



KIT DE DÉPART

- 1 SUPPORT VISIÈRE AVEC CLIPS INTÉGRÉS
- 1 FEUILLE DE PROTECTION



1. Dissociez les éléments de la structure et positionnez-les comme suit.




2. Prenez le composant 1 et positionnez les clips vers le bas afin d'y insérer la feuille de protection.



3. Faites glisser la feuille en vous assurant que les encoches de la feuille de protection soient en dessous des clips. Puis, retourner le composant 1 avec la feuille insérée.



4. Relevez les encoches de la feuille comme sur l'image afin d'empêcher la feuille de sortir de son emplacement.

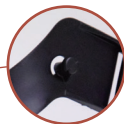

Astuce :
Disponible des deux côtés du composant 2, cette encoche permet l'accroche des languettes des masques afin de soulager les oreilles.

5. Prenez le composant 2 et insérez la languette de réglage afin d'ajuster le support visière à votre tête.



Astuce de montage:
Tirez légèrement sur la feuille afin de vous assurer qu'elle ne sorte pas.



6. Insérer la petite languette du composant 1 jusqu'à sa butée dans les extrémités des deux côtés afin de finaliser la VPI CLASSIC.



Pièce entièrement assemblée.



PARFAITE TRANSPARENCE



COMPATIBLE AVEC LE PORT DE LUNETTE



ADAPTÉ AU PORT D'UN MASQUE

NETTOYAGE DU PRODUIT

Nous recommandons de procéder au nettoyage de la visière toutes les 4h.

Mode opératoire :

- Démontez la visière du support.
- Lavez la visière et le support avec un tissu microfibre pour ne pas rayer l'écran, en utilisant de l'eau savonneuse.
- Remontez la visière sur le support.
- Se laver les mains après l'opération.

Stocker le produit lorsqu'il n'est pas utilisé à l'abri de la poussière, d'une flamme ou d'une source de chaleur (*matériau inflammable*).

Cette visière est fabriquée uniquement pour la protection COVID-19. Cette visière n'est pas une visière à usage général et ne doit pas être utilisée à des fins autres que la protection contre COVID-19. Elle protège le porteur contre des grosses gouttelettes émises immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l'écran, mais ne protège pas des particules en suspension.

Cette visière vient en complément des protections de voies respiratoires adéquates. L'utilisateur doit contrôler lors du montage initial ou du remontage après nettoyage, l'absence de défaut sur la visière (fissures, rayures), ou le support (déchirure). Toute visière abîmée (trou, déchirure, fissure), doit être changée. L'ancienne visière doit être désinfectée ou lavée avant d'être jetée avec les plastiques ménagers (matière PET recyclable).

R8.01 - COVID19, EPI catégorie III, Classe optique 3.