




KIT DE DÉPART

- 1 SUPPORT VISIÈRE
- 1 FEUILLE DE PROTECTION
- 3 CLIPS

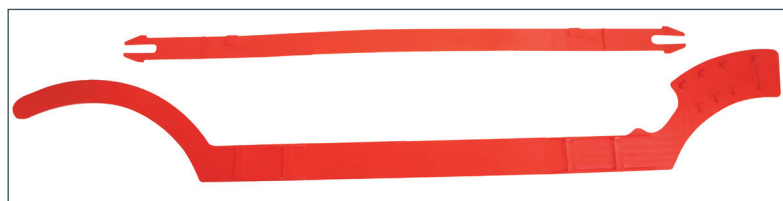

**Recommandation de montage :**  
Nous conseillons de mettre à plat les éléments afin de bien débiter l'assemblage de la visière.

1. Séparer les éléments et positionner les comme ci-dessus.



2. Insérer la petite languette jusqu'à sa butée dans les extrémités des deux côtés.



3. Insérer la languette de réglage afin d'ajuster le support visière à votre tête.



4. Insérer la visière transparente dans les deux encoches se trouvant de chaque côté du support. Puis, bloquer la visière au moyen des 3 clips.



PIÈCE ENTIÈREMENT ASSEMBLÉE.

NETTOYAGE DU PRODUIT

Nous recommandons de procéder au nettoyage de la visière toutes les 4h.

Mode opératoire :

- Démonter la visière du support.
- Laver la visière et le support avec un tissu microfibre pour ne pas rayer l'écran, en utilisant de l'eau savonneuse.
- Remonter la visière sur le support.
- Se laver les mains après l'opération.

Stocker le produit lorsqu'il n'est pas utilisé à l'abri de la poussière, d'une flamme ou d'une source de chaleur (*matériau inflammable*).

*Cette visière est fabriquée uniquement pour la protection COVID-19. Cette visière n'est pas une visière à usage général et ne doit pas être utilisée à des fins autres que la protection contre COVID-19. Elle protège le porteur contre des grosses gouttelettes émises immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l'écran, mais ne protège pas des particules en suspension.*

*Cette visière vient en complément des protections de voies respiratoires adéquates. L'utilisateur doit contrôler lors du montage initial ou du remontage après nettoyage, l'absence de défaut sur la visière (fissures, rayures), ou le support (déchirure). Toute visière abîmée (trou, déchirure, fissure), doit être changée. L'ancienne visière doit être désinfectée ou lavée avant d'être jetée avec les plastiques ménagers (matière PET recyclable).*

R8.01 - COVID19, EPI catégorie III, Classe optique 3.